


Isolite® System Reiniging

Volg deze instructies op voor het reinigen van uw Isolite®-apparaat.

Alle onderdelen van de titanium Control Head kunnen in een autoclaaf worden gesteriliseerd,

BEHALVE de Led Lichtregelaar = light stick!

Demonteer de Isolite® - Control Head

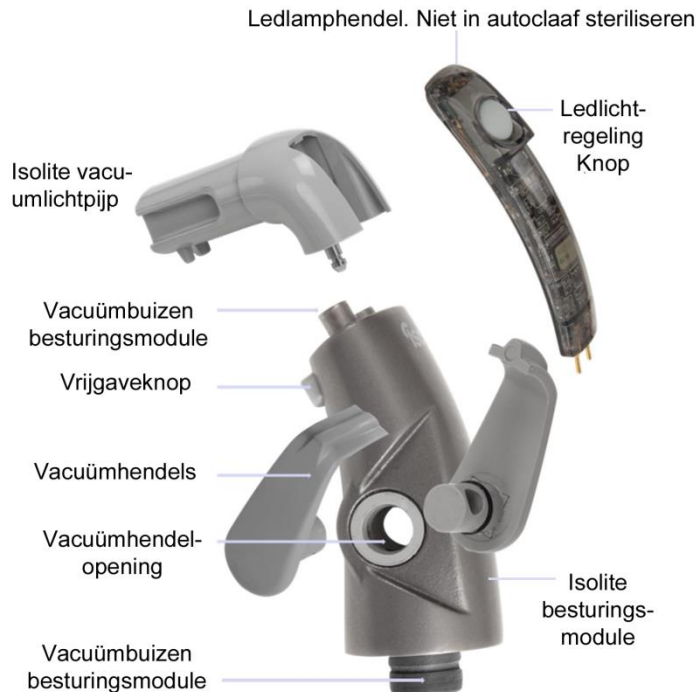

Afbeelding 7. Isolite-regelkop

- Stap 1:** Druk op de vrijgaveknop op de onderkant van de titanium control head (besturingsmodule) om de vacuüm lichtpijp vrij te geven en los te koppelen.
- Stap 2:** Verwijder vervolgens de Led Lichtregelaar (light stick) van de titanium control head.
- Stap 3:** Verwijder daarna de control head van de voedingsslang.
- Stap 4:** Tenslotte verwijdert u de twee vacuüm hendels van de Control head.

2. Reiniging en sterilisatie vacuüm lichtpijp en titanium Control head

De vacuüm lichtpijp en de Control head zijn hittebestendig.

- Stap 1:** Verwijder met slangborstel (meegeleverd) biomaterie en ander restmateriaal uit de zuigkanalen.
Gebruik pH-neutrale (6,5-7,5), enzymatische reinigungsoplossing (Durr ID212 bijv.)
Spoel onderdelen met kraanwater, droog ze af, plaats ze in een autoclaafzak en steriliseer ze in een stoomautoclaaf.
Advies: Deze onderdelen na elke patiënt steriliseren.
- Stap 2:** Na sterilisatie de O-ringen van de Vacuüm hendel en O-ring van de voedingsslang insmeren met Dow 111 siliconenmengsel (meegeleverd). Gebruik geen oplossing om onderdelen te bewaren.

